

	<b>INSTRUCCION DE TRABAJO PARA RECOLECCION DE MUESTRA DE ORINA EN UNIDADES MOVILES DE SALUD.</b>	Código: IT-CH-UM-07
		Página 1 de 2
	<b>DIVISION DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO</b>	Fecha de Revisión: Junio 2018
Versión vigente: 00		

INDICE	Pág.
1.0 ALCANCE.....	1
2.0 DOCUMENTOS APLICABLES.....	1
3.0 DEFINICIONES.....	1
4.0 MATERIAL Y EQUIPO .....	1
5.0 DESARROLLO.....	2
6.0 ANEXOS.....	2
7.0 CONTROL DE CAMBIOS.....	2

**1. Alcance:**

Este documento es aplicable para Química farmacobióloga y/o técnica laboratorista clínica, adscritos a unidades móviles de salud (UMS) del Antiguo Hospital de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” (AHCGFAA).

**2. Documentos Aplicables:**

N/A Ficha clínica unidades móviles de salud

**3. Definiciones:**

**Análisis:** Son pruebas diagnósticas para medición de un valor determinado.

**Toma de muestra:** Procedimiento especializado que consiste en la obtención de uno o varios especímenes biológicos

**Examen General de Orina:** Es la evaluación física, química y microscópica de la orina. Dicho análisis consta de muchos exámenes para detectar y medir diversos compuestos que salen a través de la orina.

**4.- Material y Equipo:**

- Frasco / vaso recolector
- Tira reactiva
- Gasa
- Pluma

	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Autorizó</b>
COPIA NO CONTROLADA	Dra. María del Mar González de la Peña Medico Unidades Móviles de Salud.	M. en C. Carolina Rodríguez Meja. Asistente de Div. De Ser. Aux. de Dx. Y Tx.	Dr. Héctor Morales Villaruel Jefe División de Servicios Auxiliares de tratamiento y diagnóstico.



**INSTRUCCION DE TRABAJO PARA RECOLECCION DE  
MUESTRA DE ORINA EN UNIDADES MOVILES DE  
SALUD.**

**DIVISION DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO  
Y TRATAMIENTO**

Código: IT-CH-UM-07

Página 2 de 2

Fecha de Revisión: Junio  
2018

Versión Vigente: 00

**5. Desarrollo:**

<b>No.</b>	<b>Responsables</b>	<b>Descripción de la Actividad</b>
<b>5.1</b>	<b>QFB, TLC adscrita a UMS del AHCGFAA.</b>	Da al paciente recipiente para recolección de orina (si se tiene) o se le pide que lo traiga él.
<b>5.2</b>	<b>Paciente</b>	Trae muestra de orina.
<b>5.3</b>	<b>QFB, TLC adscrita a UMS del AHCGFAA.</b>	Introduce tira reactiva a recipiente de orina por el tiempo indicado. Retira el exceso de orina de la tira y coloca en gasa.
<b>5.4</b>	<b>QFB, TLC adscrita a UMS del AHCGFAA.</b>	Pide a paciente que deseche la orina en inodoro y el frasco en basurero.
<b>5.5</b>	<b>QFB, TLC adscrita a UMS del AHCGFAA.</b>	Interpreta resultados de la tira reactiva de acuerdo al tiempo indicado en el contenedor de estas.
<b>5.6</b>	<b>QFB, TLC adscrita a UMS del AHCGFAA.</b>	Deshecha tira reactiva y gasa en bolsa naranja.
<b>5.7</b>	<b>QFB, TLC adscrita a UMS del AHCGFAA.</b>	Transcribe el resultado, lo imprime y lo coteja con los exámenes sanguíneos para entregarlos.

**6. Anexos**

Inserto de tiras de orina.

**7. Control de Cambios:**

<b>Versión Vigente</b>	<b>Fecha</b>	<b>Motivo</b>
00	Junio 2018	Alta documento

COPIA NO CONTROLADA